

機械器具 55 医療用洗浄器  
一般医療機器 滅菌済み手動式生体用洗浄器 34629009

## シャワーくん

### 再使用禁止

#### 【警告】

1. 本品は、医家向けであるので、手技に精通した術者のみ使用すること。
2. 併用する医薬品、医療機器の添付文書を必ず参照すること。
3. 全ての操作は無菌的に行うこと。

#### 【禁忌・禁止】

##### 使用上の禁忌


本品は、滅菌済みであり使用は1回限りとし、再滅菌や再使用はしないこと。

#### 【形状・構造及び原理等】

##### 1. 構造図

本品は、ボトル本体と注水口で構成されている。

- ・サイズ: 幅 73mm × 奥行 50mm × 長さ 275mm
- ・容量: 450mL

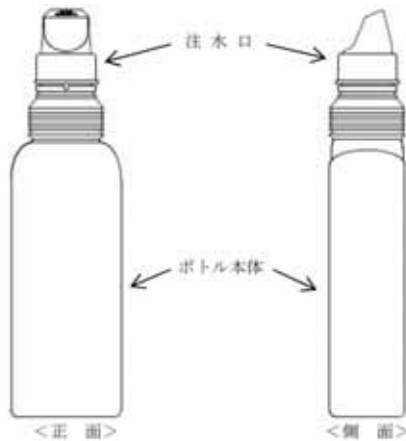

##### <材質>

- ・ボトル本体: ポリプロピレン
- ・注水口: ポリプロピレン

##### 2. 動作原理

本品は、洗浄液(滅菌済み生理食塩液等)を入れ、手で加減しながらボトル本体を握ることで、洗浄液のシャワーの量を調整できる。注水口の角度は自由に変えることができる。

#### 【使用目的、効能又は効果】

本品は滅菌済み生理食塩液等により、カテーテル術中にカテーテルの手元部周辺を洗浄する目的で使用する。

#### 【操作方法又は使用方法等】

1. 滅菌済みの生理食塩液等の洗浄液を、注水口を外しボトル本体に入れる。
2. ボトル本体のねじ部分に注水口を取り付ける。
3. 洗浄したい箇所に洗浄液が当たるように、注水口の先端孔を下向きにして、軽く本体を握り、洗浄液を出し洗浄する。

#### 【使用上の注意】

##### 1. 使用前の注意

包装や内容物が破損、汚染等している場合は使用しないこと。

##### 2. 使用中の注意

注水口の付け外しは、ボトル本体のジャバラ部分を縮めた状態で行うこと。

##### 3. 使用後の注意

感染防止に留意し、安全な方法で医療廃棄物として処理すること。

#### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

##### 1. 貯蔵・保管方法

- (1) 高温多湿、直射日光、水ぬれを避けて常温で保管すること。\*
- (2) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などを避け、安定した状態で保管すること。
- (3) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

##### 2. 使用期限

本品の包装ラベルに記載されている「使用期限」までに使用すること(自己認証による)。

#### 【包装】

1体入/箱

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: 株式会社グッドマン

〒460-0008 名古屋市中区栄四丁目5番3号 KDX 名古屋栄ビル5階

電話番号: 052-269-5300\*



製造元: 株式会社グッドマン

GM73